



毎日の点検

装置自身が毎日セルフテストを行い、結果をステータスインジケータに表示します。

1日1回ステータスインジケータの表示を確認します。

※巻末の点検表を活用してください。

※緊急時に本装置を正常に使用するためには、事前に教育を受けた点検担当者が日常点検を適切に行い、常に装置が使用できる状態にしておく必要があります。

📖 P.12 **57** 機器の設置・運用に当たっては設置者および点検担当者を明確にしてください。

使い捨て除細動パッドの使用期限は
すぎているいませんか？

バッテリーパックの使用期間は待機寿命*を
こえていませんか？

- 待機寿命*
- ・NKPB-14301:2年
 - ・NKPB-28271:4年

※待機とは、装置にバッテリーパックと
使い捨て除細動パッドを接続し、
フタを閉じている状態です。



毎日の点検

ステータスインジケータが緑色(使用可の状態)を
表示していることを確認してください。

何らかの問題がある場合は、赤色(使用不可の状
態)を表示し、アラーム音が10秒毎に鳴ります。

使用可の状態(緑色)



使用不可の状態(赤色)



ステータスインジケータが赤色を表示し、アラーム
音が鳴っているときは、装置の電源を入れ、音声ガイ
ドを確認してください。📖 P.31 音声ガイド

セルフテストについて

使い捨て除細動パッド、バッテリー、内部電子回路を装置
自身が定期的に点検します。これをセルフテストとい
います。セルフテスト中はステータスインジケータを
赤色に表示します。約2秒でセルフテストは終了し、問
題がなかった場合は、ステータスインジケータを緑色
に表示します。何らかの問題がある場合は、ステータス
インジケータを赤色に表示し、10秒毎に大きな音でア
ラーム音を鳴らし続けます。

セルフテストは毎日、毎月ごとにそれぞれ自動で行い
ます。



セルフテスト中は
赤色を表示します。

約2秒



問題がなかった場合
は緑色を表示します。

毎日のセルフテスト

毎日午前12時(正午)にセルフテストを行います。
バッテリーパック、使い捨て除細動パッド、装置の回路
が正常であるかどうかをテストします。また、装置の
電源を入/切したあとも、同様のセルフテストを行いま
す。

毎月のセルフテスト

毎月15日の午前12時(正午)にセルフテストを行います。
装置の回路が正常であるかどうかをテストします。
毎日のセルフテストに加えて、最大エネルギーを充電
し、内部放電することで高電圧回路をテストします。

テスト結果の保存・送信

セルフテストの結果は内部メモリに保存されます。
オプションの「Bluetoothアダプタ」と「AEDレポート
表示・設定ソフトウェア」を使用すると、毎日・毎月の
テスト結果をBluetooth無線通信によって指定のパン
コンへ自動送信することができます。

📖 AEDレポート表示・設定ソフトウェア取扱説明書

毎月の点検

ステータスインジケータの表示を確認することで使用できる状態であることがわかりますが、より確実な動作のために、月に一回の定期点検を必ず行ってください。

※巻末の点検表を活用してください。

※緊急時に本装置を正常に使用するためには、事前に教育を受けた点検担当者が日常点検を適切に行い、常に装置が使用できる状態にしておく必要があります。

P.12 57 機器の設置・運用に当たっては設置者および点検担当者を明確にしてください。

バッテリーパックの使用期間の確認

取り付けられているバッテリーパックが待機寿命*を過ぎていないか確認します。待機寿命*を過ぎている場合は、新しいバッテリーパックに交換してください。

P.21 設置する

待機寿命*
・NKPB-14301:2年 ・NKPB-28271:4年

※待機とは、装置にバッテリーパックと使い捨て除細動パッドを接続し、フタを閉じている状態です。

使い捨て除細動パッドの使用期限の確認
接続してある使い捨て除細動パッドが使用期限を過ぎていないか確認します。使用期限が過ぎている場合は、使い捨て除細動パッドを交換してください。

P.19 設置する

使い捨て除細動パッドの接続の確認

ロックがかかる位置まで確実に接続されているかを確認します。

P.19 設置する

診断パネルのランプについて

パッド点検ランプ

使い捨て除細動パッドが本装置から外れている場合や、パッドに異常がある場合に点灯します。点灯している場合は、使い捨て除細動パッドの接続状態を確認してください。接続に異常がないのに点灯している場合は、パッドに異常が考えられるため、新品と交換してください。

使い捨て除細動パッドの交換方法: P.19 設置する

要修理ランプ

装置が故障している場合に点灯します。当社営業員または販売店にご連絡ください。

バッテリー残量ランプ


バッテリー残量を5段階で表示します。左から2番目のランプのみが緑色に点灯しているとき、または1番左のランプが赤色に点灯しているときは、バッテリーパックを交換してください。1番左の赤色ランプは、バッテリー残量が0%のとき、バッテリーパックの廃棄期限が過ぎているときや当社の指定外のバッテリーが取り付けられているときに点灯します。

バッテリーパックの交換方法: P.21 設置する

毎月の点検手順

ブザー、ランプ、ステータスインジケータ、スピーカ、スイッチの点検

各機能が正しく動作しているか確認します。

フタの開け閉め、使い捨て除細動パッドの接続・取り外し方法:  P.19 設置する

1 電源スイッチをオンにしてフタを開ける

- “ピヨッ”と音がして、すべてのランプが点灯することを確認します。
- ステータスインジケータが赤色を表示したあと、約2秒後に緑色を表示することを確認します。
- 音声ガイド「成人モードです。意識・呼吸を確認してください。」が聞こえることを確認します。
- バッテリー残量ランプが緑色で2個以上点灯していることを確認します。

2 ショックボタンを押す

ショックボタンを押すと“ピッ”と音が聞こえることを確認します。

3 成人・小児モード切換スイッチを切り換える

- 小児モード側(1歳以上8歳未満の側)に合わせると、「小児モードです」という音声ガイドが聞こえることを確認します。
 - 成人モード側(8歳以上の側)に戻すと、「成人モードです」という音声ガイドが聞こえることを確認します。
- ※成人・小児モード切換スイッチは、必ず成人モード側(8歳以上の側)に合わせてから点検を終了してください。
ただし、おもに1歳以上8歳未満の小児に使用することを想定して本装置を設置する場合は、小児モード側(1歳以上8歳未満の側)に合わせてから点検を終了してください。

4 フタを閉じて電源スイッチをオフにする

ステータスインジケータが緑色を表示することを確認します。*

※点検の後は、ステータスインジケータが赤色を表示してもアラーム音は鳴りません。

フタを開けたときに「装置の点検が必要です」と聞こえたら

電源スイッチをオンにしてフタを開けたときに、「装置の点検が必要です。取扱説明書にしたがって、点検を実施してください」と聞こえてきた場合は、装置の温度が異常なため、セルフテストが行われていない状態です。

下記の手順にしたがい、点検を実施してください。

装置を0℃～50℃の環境に置き、バッテリーパックを取り外し、ふたたびバッテリーパックを取り付け、約10秒後にステータスインジケータが緑色を表示することを確認します。赤色のままのときは、電源スイッチをオンにして、フタを開け、聞こえてくる音声ガイドにしたがってください。

装置の耐用期間について

本装置の耐用期間は、ご購入いただいてから6年です。

6年以上が経過した装置につきましては、買い換えていただくことをお勧めしています。

私たちの行動で救える命があります!

定期的な点検

外観の確認

ひびや割れ、がたつきがないかどうかを定期的を確認してください。

汚れが目立つときは、清掃を行ってください。

清掃方法

布を水または薄めた中性洗剤でひたし、固く絞り、表面を拭いてください。



付属品の確認

付属品がそろっているかどうかを定期的を確認してください。📖 P.16 ご確認ください

定期交換部品

※定期交換部品の購入については、当社または販売店にご連絡ください。

※交換時は付属のシールをAED日常点検タグに貼ってください。📖 P.22 AED日常点検タグ

バッテリーパック

NKPB-14301の場合:
寿命は使用を開始してから約2年です。



NKPB-28271の場合:
寿命は使用を開始してから約4年です。



○バッテリーの寿命について:

📖 P.10 ! 40

ラベルに表示されている使用開始期限を過ぎたものは使用しないでください。

また、万が一に備えて予備のバッテリーパックを用意していただくことをお勧めします。

※バッテリーパック NKPB-1430は本装置（ステータスインジケータの周囲の色が紫色の装置）に対応していません。ご購入の際は、NKPB-14301またはNKPB-28271をご注文ください。

※ステータスインジケータの周囲の色がオレンジ色の装置をご使用の場合は、バッテリーパック NKPB-1430をご注文ください。

○交換方法: 📖 P.21 設置する

○廃棄について: 📖 P.10 ! 39

使い捨て除細動パッド (P-530、P-531)

小児用使い捨て除細動パッド(P-532)



パッケージに表示されている使用期限が過ぎたら新品に交換してください。

また、予備の使い捨て除細動パッドを用意してください。

○交換方法: 📖 P.19 設置する

○廃棄について: 📖 P.12 ! 56

保守部品の保有期間について

当社では、本装置の保守部品（製品の機能を維持するために必要な部品）は、お客様が本製品をご購入されてから6年間保有しています。この部品保有期間を修理可能期間とさせていただきます。

※購入された時期によっては、保有期間が短縮されていることがあります。

※保有期間を経過したあとも、故障箇所によっては修理可能な場合があります。